
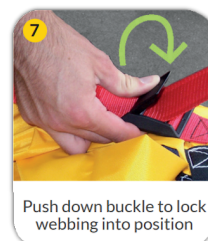


ResQmat – Brukermanual

ResQmat leveres i en spesialdesignet bag slik at den kan oppbevares i et skap eller sammen med annet nødutstyr. Det kan være mulig for én person å bære fire, eller eventuelt flere, ResQmat-er til stedet der de trengs under en nødevakuering (for evakuerte personer).

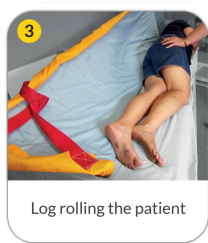

For nødevakuering av ikke-gående personer

VIKTIG: Dette dokumentet er kun en veiledning. Rådfør deg alltid med ansvarlig for forflytning eller relevant terapeut, da instruksjonene kan tilpasses lokale forhold. Alltid refererer deg til original bruksmanual utgitt av EVAC+CHAIR.

Polstret pasientredningsmatte – Artikkel 220P (for vinyl og teppe)

Bruk: Ta ResQmat med til personen som skal evakueres. Åpne borrelåsfestene øverst på bagen og ta matten raskt ut. Fjern stroppen rundt matten og brett den helt ut. Tom bag må ikke etterlates slik at noen kan snuble i den.

Hvis personen ligger i seng eller tilbakelent stol, benyttes «log roll»-teknikk for å plassere ResQmat under personen. Den siden med myk borrelås bør ligge ned. Kontroller at den røde forkortingsstroppen ikke havner under personen.

Plasser hodet på puten med skuldrene tett inntil kanten. Puten beskytter hodet ved trappegang og rundt hjørner.

Hvis personen sitter i stol eller rullestol: Aktiver bremsene og fjern eller sving bort fotstøtter. Plasser ResQmat foran stolen med puten ved føttene. Løft bena forsiktig slik at personen sklir kontrollert ned på matten.

Når personen ligger på ResQmat, brettes sidene tett rundt kroppen og festes med borrelås. Start nederst ved føttene. Sørg for at føttene er innenfor V-formen på den røde stroppen.

Trekk den røde stroppen gjennom spennen ved brystet for å forkorte lengden på ResQmat. Dette sikrer bedre kontroll ved trappenedgang og skarpe svinger.

EVAC+CHAIR®

The World's No.1 Stairway Evacuation Chair

ResQMat Evakueringsmadrass.

Evakuering i trapper

Ved nedstigning i trapper vil vekten oppleves tyngre på grunn av tyngdekraften.

Belastningen må fordeles mellom personell ved hode- og fotenden.

Ved behov kan flere hjelpere benyttes.

Bruk hodestroppen kun når nødvendig.

Det er mindre belastning å trekke fra fotenden.



Sikkerhet, vedlikehold og lagring

Maksimal sikker arbeidsbelastning (SWL): 300 kg.

Lagring: Oppbevares tørt, rent og skjermet mot direkte sollys. Unngå ekstreme temperaturer.

Rengjøring: Tørk av med mildt rengjøringsmiddel og fuktig klut. Pute og trekk kan vaskes ved 70–80 °C ved smittevask. Alle deler må tørkes helt før bruk.

Årlig kontroll: Produktet skal inspiseres minst én gang per år. Skader eller slitasje som kan påvirke sikker bruk skal rapporteres og produktet tas ut av bruk.

Dette produktet har ingen definert levetid, men korrekt bruk og vedlikehold forventes å gi mange års tjeneste.

Viktig melding til kjøper:

Følgende gis i stedet for alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte. Selgers og produsents eneste forpliktelse skal være å erstatte den mengden av produktet som viser seg å være defekt. Eventuelle skriftlige eller muntlige instruksjoner, inkludert instruksjonsark og demonstrasjonsvideoer, er kun en veiledning, da trenere kan tilpasse våre råd for individuelle omsorgspersoner eller pasienter. Verken selger eller produsent skal holdes ansvarlig for skade, tap eller annen ulempe, direkte, indirekte eller som følge, som oppstår på grunn av manglende evne til å bruke dette produktet. Før bruk skal brukeren vurdere produktets egnethet for tiltenkt bruk, og brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette. Ingen uttalelse eller anbefaling som ikke er inkludert her, skal ha noen gyldighet eller virkning med mindre det fremgår av en avtale signert av representanter for selger og produsent. Alle produkter er designet for å assistere sykepleiere og pasienter. Pasientens pleie skal aldri forsømmes, og når produkter er i bruk, bør kontinuerlig vurdering gjennomføres for å sikre at produktene fortsatt er hensiktsmessige for pasientens tilstand. Regelmessig vedlikehold og inspeksjon er nødvendig, og skadede produkter skal tas ut av bruk inntil de er utbedret.